

Bruksanvisning Catell Armsling Double

Artikelnummer BA160



För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde:

Användningsområde: Immobilisering arm, skuldra och nyckelben. Arm- och axelskador när fixering krävs, stukningar eller andra fall där vila krävs.

Applicering:

Det underlättar att applicera armslingan med hjälp av annan person. Är du ensam kan du underlätta appliceringen genom att stå framför en spegel.

1. Öppna upp kardborrebandet på armfickan, reglera kardborren till lämpligt omfång för underarmen
2. Placera underarmen i armfickan
3. Lägg banden över axlarna, korsa dem snett över ryggen
4. För banden under och snett upp mot armfickan
5. Fäst den hårda kardborren på armfickans framsida.
6. Var noga med att hitta exakt placering av arm och skuldra genom kardborrens placering.
7. Se till att handen har en lämplig position och att fingrarna kan röra sig fritt.

I de fall där extra fixering krävs:

Använd det långa breda bandet för att fixera armen mot bälten.

1. Applicera immobiliseringsbandets kardborre på materialet i lämplig höjd ovanför armfickan och armbågen av den skadade armen
2. Fixera armen runt bälten med hjälp av bandet
3. Fäst bandet med de hårda kardborrebanden

Material:

Polyamid, Polyester

Tvättråd:

- Kan tvättas för hand eller i maskin, 30 C grader.
- Stäng alla kardborre band.
- Använd mild tvättmedel.
- Om du tvättar i maskin, använd en tvättpåse.
- Använd en handduk för att absorbera extra vatten efter tvätt
- Plan eller droptorkas.

**Storlekstabell:**

Mät underarmslängden i centimeter

	S	M	L
CM	28-33	33-38	38-43

Mät underarmslängden i centimeter.

*Passar både höger och vänster arm.

Vår målsättning är att våra produkter skall vara till hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta din förskrivare eller oss på Catell omgående.