

Bruksanvisning Catell Armsling Light

Artikelnummer 8850



För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde:

Catell armslinga gör det enkelt att immobilisera axel och arm.

Applicering:

1. Gör en ögla för applicering på underarmen nära armbågen
2. För slingan bakom ryggen över motsatt axel ner mot hand/handled
3. För slingan runt patientens handled och justera handens läge genom att fästa kardborren mot slingan
4. Var noga med att hitta den exakta placeringen för armen och skuldran.
5. Fäst den vadderade kudden under armslingan mot axeln.

Material:

Polyamid, Polyester

Tvättråd:

- Kan tvättas för hand eller i maskin, 30 C grader.
- Stäng alla kardborreband.
- Använd mild tvättmedel.
- Om du tvättar i maskin, använd en tvättpåse.
- Använd en handduk för att absorbera extra vatten efter tvätt
- Plan eller dropptorkas.



Storlekstabell:

Mät underarmslängden i centimeter

	S	M	L
CM	One Size		

*One size. Passar både höger och vänster arm.

Vår målsättning är att våra produkter skall vara till hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta din förskrivare eller oss på Catell omgående.