

Bruksanvisning Catell Armsling Smart

Artikelnummer 8870



För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde:

Catells bilaterala armslinga gör det enkelt att immobilisera axel och arm.

Applicering:

Det underlättar att applicera armslingan med hjälp av annan person. Är du ensam kan du underlätta appliceringen genom att stå framför en spegel.

1. Öppna upp bälbandet, placera det strax under bröstet, bälbandet bör gå ca 20 cm omlott. Omfånget på bälbandet kan lätt anpassas med sax, överblivet material klipps av i anslutning till någon av de längsgående sömmarna.
2. Knäpp bälbandet, vänd bandet så att kardborreknäppningen lätt kan öppnas med den friska armen/handen.
3. Placera överarmsmanschetten på överarmen (skadade sidan). Vänd manschetten så att kardborreknäppningen lätt kan öppnas med den friska armen/handen. Omfånget på manschetten kan lätt anpassas med sax, överblivet material klipps av i anslutning till någon av de längsgående sömmarna. Därefter försluts manschetten.
4. Placera handledsmanschetten på bälbandet, i nivå med handleden, så att plastsöljan hamnar uppåt. Därefter försluts manschetten.
5. Placera axelremmens kardborredel på mitten av bälbandets baksida. För axelremmen snett över ryggen upp över axeln på den friska sidan.
6. Fäst axelbandets spänne i handledsmanschetts sölja och justera därefter längden på axelremmen. Längden på axelremmen kan lätt anpassas med sax. Justera därefter axelpolstringen så den hamnar över axeln.
7. Var noga med att hitta den exakta placeringen av skuldran, armen och handen. Vid behov av extra stöd för handen placeras den lösa tumöglan på handledsmanschetten mellan tumme och pekfinger.

Material:

Polyamid, Polyester.

Tvättråd:

- Kan tvättas för hand eller i maskin, 30 C grader.
- Stäng alla kardborre band.
- Använd mild tvättmedel.
- Om du tvättar i maskin, använd en tvättpåse.
- Använd en handduk för att absorbera extra vatten efter tvätt
- Plan eller droptorkas.

**Storlekstabell:**

	S	M	L
CM	One Size		

*One size. Passar både höger och vänster arm.

Vår målsättning är att våra produkter skall vara till hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta din förskrivare eller oss på Catell omgående.