



Bruksanvisning Catell Armsling Standard

Artikelnummer BA110

Användningsområde: Arm- och axelskador, stukningar eller i andra fall där vila krävs.

Applicering:

1. Öppna upp kardborrebanden. Den hårda kardborren fäster var som helst på foam-materialet.
2. Placera underarmen i armpåsen.
3. Applicera de två medföljande kardborrestängningarna; kardborrebandet med de två plastöglorna placeras i handledsnivå och det släta bandet placeras vid påsens övre öppning. (Se placering på bild)
4. För det fasta bandet från tygpåsen snett över ryggen till motsatt axel
5. Fortsätt med bandet ner mot det övre plastspännet i handledsnivå, trä igenom plastöglan och reglera i lämpligt läge. Var noga med att hitta den exakta placeringen för armen och skuldran.
6. Vid behov av ytterligare fixering av armen intill bålen används extrabandet som midjebälte. Trä bandet genom den nedre plastöglan och stäng kardborren. För resterande bandet runt bålen och fäst den hårda kardborren på armpåsen.
7. Önskas polstring för axel; trä på den medföljande axelpolstringen på bandet innan appliceringen börjar.
8. Vid behov av stöd för handen placeras den lösa tumöglan vid påsens öppning mellan tumme och pekfinger.

Material: Polyamid, Polyester.

Tvättråd:

- Kan tvättas för hand eller i maskin, 30 C grader.
- Stäng alla kardborre band.
- Använd mild tvättmedel.
- Om du tvättar i maskin, använd en tvättpåse.
- Använd en handduk för att absorbera extra vatten efter tvätt
- Plan eller dropporkas.



Storlek:

Mät underarmslängden i centimeter

	XS	S	M	L	XL
CM	23-28	28-33	33-38	38-43	43-48

*Passar både höger och vänster arm.

Vår målsättning är att våra produkter skall vara till hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta din förskrivare eller oss på Catell omgående.