

Bruksanvisning EDEMA Ödemhandskar

För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Modell

Kompressionsklass

EDEMA Light

Kompressionsklass 1 (15-25 mmHg)

EDEMA Medium

Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg)

Egenskaper

- Sömmar på utsidan som minimerar tryck på känsliga punkter
- Trots kompression ger handsken möjlighet till aktivitet

Använd handsken

- Enligt ordination från förskrivare (tex arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare)
- Med sömmarna utåt

Kontakta din förskrivare om

- Svullnaden ökar
- Handsken ger känselbortfall/domningar
- Handsken ger smärta

Materialspecifikation

- EDEMA Light består av 85% nylon, 15% spandex
- EDEMA Medium består av 80% nylon, 20% spandex
- Båda materialen är latexfria

Tvättråd



Måttabell

Storl	* Mått
XXS	13-15 cm
XS	15-18 cm
S	18-20 cm
M	20-22 cm
L	22-24 cm
XL	24- cm

* Mått toges cirkulärt runt MCP och skall ses som vägledning för en förenklad utprovning.

Catell målsättning är att våra produkter skall vara till god hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta oss omgående.