

## Bruksanvisning – Elbowstrap


Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

### Användningsområde


Ortosen stödjer och avlastar brukarens armbåge vid nervinklämning, efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment. Rådgör med din ordinator eller utprovare om val av modell eller kontakta Catell.

### Applicering


1. Öppna kardborrbanden, placera armbågen i bandaget, enligt bild 1.
2. Dra bandet så att det omsluter armbågen. Stäng kardborrbandet. Bild 2.
3. Vid behov av stabilare stöd, placera förstärkningen längs med armen i nivå med armvecket, enligt bild 3.
4. Linda resterande del av bandet runt armbågen och stäng kardborren. Bild 4.
5. När önskat omfång av ortosen har uppnåtts kan denna dras av och på utan att öppnas.

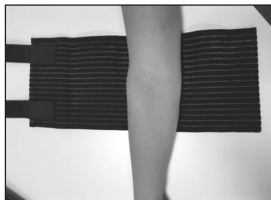


1.

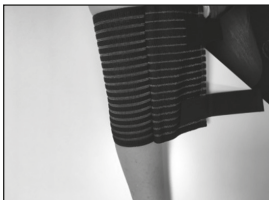

2.

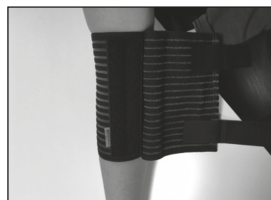

3.

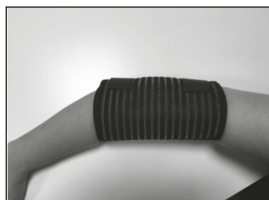

4.

Justera kardborrbanden vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

**Material**

Polyester, elasthan, nylon

**Tvättråd**

Slut kardborrbanden och ta bort skenfickan. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse.  
Låt ortosen dropptorka.

**Måttabell**

Modell	Bredd	Längd
Short	19 cm	50 cm
Long	25 cm	60 cm