

# Bruksanvisning – Catell Ödemhandske

(5050, 6050)

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

## Kompressionsklass

Kompressionsklass 1-2 (15-25mmHg)

## Egenskaper

Sömmar på utsidan för att minimera tryck på känsliga punkter

## Använd handsken

Enligt ordination från förskrivare

Med sömmarna utåt

## Kontakta din förskrivare om

Svullnaden ökar

Handsken orsakar känselbortfall/domningar

Handsken orsakar smärta

## Material

Nylon, Lycra, Spandex

Produkten är latexfri

## Tvättråd



## Måttabell

Strl	*Mått	Strl	*Mått
XS	15-18 cm	M	19-22 cm
S	18-20 cm	L	20-25 cm

\*Mått tas cirkulärt runt MCP och ska se som en vägledning för en förenklad utprovning.

# Operating instructions – Catell Edema Glove

(5050, 6050)

Catell recommend that the product is tested and adapted by a licensed or otherwise qualified staff. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occurs.

## Compression class

Compression class 1-2 (15-25mmHg)

## Properties

Seams on the outside to minimize pressure on sensitive points

## Use glove

As recommended by prescriber

With the seams outside

## Contact your prescriber if

The swelling increases

The glove causing numbness

The glove causes pain

## Material

Nylon, Lycra, Spandex

The product is latex free

## Washing



## Size chart

Size	*Dimension	Size	*Dimension
XS	15-18 cm	M	19-22 cm
S	18-20 cm	L	20-25 cm

\* Dimensions are taken circularly around the MCP and should look as a guide for a simplified testing.